
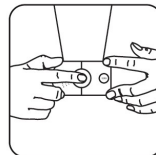


## **KRATKA NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE VitaPhone 100 IR**

1. Elektrode naprave Vitaphone 100 IR pritisnite na kožo (na prsni koš, kot je vidno na sliki) in jo nepremično držite v vodoravni legi ves čas snemanja (pazite, da so vse štiri elektrode enako pritisnjene k koži). Naprava mora biti obrnjena tako, da tisti, ki je nasproti vas, pravilno prebere napise na napravi. Nato pritisnite gumb "RECORD". **Snemanje traja 30 sekund.** Med snemanjem slišite elektronski zvok bitja srca. Po 30 sekundnem snemanju, naprava za 3 sekunde utihne, nato slišite še kratek pisk. To je znak, da je snemanje končano. EKG posnetek se je shranil v spomin naprave.

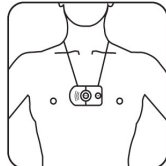

2. **Po končanem snemanju pokličite številko določeno za pošiljanje posnetih podatkov. Številko dobite na hrbtni strani naprave VITAPHONE 100 IR. (05-7390101 ali 05-7390103)**

Sledite navodilom posnetega sporočila na avtomatskem odzivniku.

### **3. ROČNO POŠILJANJE**


#### **3.a. POŠILJANJE PREK GSM aparata:**

Zvočnik naprave Vitaphone 100 IR nemoteno zadržite **ob mikrofону mobilnega telefona** na razdalji **2 cm** (kot je narisano na sliki) in nato pritisnite gumb SEND.



#### **OPOZORILO!!!**

**Pri uporabi GSM aparata morate Gumb »SEND« pritisniti v trajanju več kot 2 sekundi. Med prenosom se sliši zvočno šumenje. Kratak pisk nas obvesti o zaključku prenosa.**

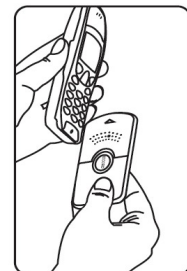


#### **3.b. POŠILJANJE PREK STACIONARNEGA aparata:**

Zvočnik naprave Vitaphone 100 IR nemoteno zadržite **ob mikrofону stacionarnega telefona** na razdalji **2 cm** (kot je narisano na sliki) in nato pritisnite gumb SEND



#### **OPOZORILO!!!**

**Uporaba stacionarnega telefona zahteva za pošiljanje le kratak pritisk na gumb "SEND" na napravi Vitaphone 100 IR. Med prenosom se sliši zvočno šumenje. Kratak pisk nas obvesti o zaključku prenosa**

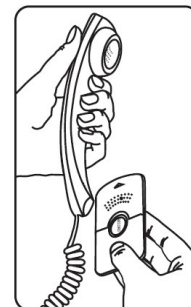

### **4. PO KONČANEM PRENOSU :**


Postavite slušalko stacionarnega telefona oziroma mobilni telefon k ušesu.

V primeru pravilnega prenosa vam bo posredovana številka naprave Vitaphone 100 IR (*napisana na zadnji strani naprave*) in prenos podatkov bo s tem zaključen.

V nekaterih primerih imate po prenosu podatkov možnost posneti še **10 sekund trajajoče sporočilo**, v katerem navedete simptome o vašem počutju v času pred snemanjem EKG. V primeru, da prenos ni bil uspešen, sledite navodilom avtomatskega odzivnika.

## **5. POŠILJANJE PREK INFRARDEČE POVEZAVE**

V primeru, da opravljate **prenos preko infrardeče povezave na GSM aparatu**, najprej **poskrbite, da bo IR funkcija aktivirana na vašem mobilnem telefonu** (pomagajte si z navodili mobilnega telefona). Ravno tako izključite možnost uporabe UMTS omrežja, saj v tem primeru podatki ne bodo poslani.

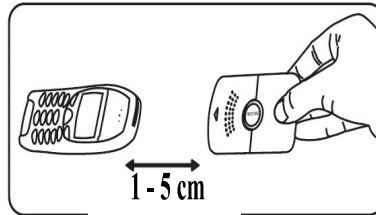

Za prenos podatkov postavite infrardečo vmesno ploskev vašega mobilnega telefona nasproti infrardeči ploskvi tele-EKG naprave v **razdalji 1-5 cm**. Pazite, da bosta vmesni ploskvi naprav v pravilni legi in pritisnite gumb "**SEND**". Prenos je avtomatsko nadzorovan. Med avtomatskim prenosom ni potrebno vnašati ali klicati nobene številke. Klic se sproži avtomatsko.

### **OPOZORILA:**

#### **Naprava se ne sme uporabljati v sledečih primerih:**

- v bližini elektronskih naprav
- pri napravah za defibrilacijo
- kjer je premočno območje elektromagnetnega sevanja (antene, transformatorji pod visoko napetostjo, generatorji, NMR tomografije (z magnetno resonanco), GSM signal),
- v primeru, da pacient uporablja zunanji srčni vzpodbujevalnik.

**Naprava Vitaphone 100 IR nikakor ne ovira delovanja kakršnih koli kirurško vsajenih srčnih vzpodbujevalnikov.**

### **POZOR!**

**Uporaba naprave ni namenjena za nujne primere. V primeru akutnih stanj uporabnika oz. pacienta, takoj pokličite zdravnika!**