
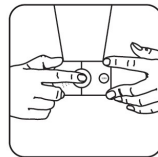


KRATKA NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE VitaPhone 100 IR

1. Elektrode naprave Vitaphone 100 IR pritisnite na kožo (na prsni koš, kot je vidno na sliki) in jo nepremično držite v vodoravni legi ves čas snemanja (pazite, da so vse štiri elektrode enako pritisnjene k koži). Naprava mora biti obrnjena tako, da tisti, ki je nasproti vas, pravilno prebere napise na napravi. Nato pritisnite gumb "RECORD". **Snemanje traja 30 sekund.** Med snemanjem slišite elektronski zvok bitja srca. Po 30 sekundnem snemanju, naprava za 3 sekunde utihne, nato slišite še kratek pisk. To je znak, da je snemanje končano. EKG posnetek se je shranil v spomin naprave.

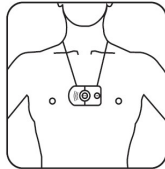

2. **Po končanem snemanju pokličite številko določeno za pošiljanje posnetih podatkov. Številko dobite na hrbtni strani naprave VITAPHONE 100 IR. (05-7390101 ali 05-7390103)**

Sledite navodilom posnetega sporočila na avtomatskem odzivniku.

3. ROČNO POŠILJANJE


3.a. POŠILJANJE PREK GSM aparata:

Zvočnik naprave Vitaphone 100 IR nemoteno zadržite **ob mikrofону mobilnega telefona** na razdalji **2 cm** (kot je narisano na sliki) in nato pritisnite gumb SEND.



OPOZORILO!!!

Pri uporabi GSM aparata morate Gumb »SEND« pritisniti v trajanju več kot 2 sekundi. Med prenosom se sliši zvočno šumenje. Kratak pisk nas obvesti o zaključku prenosa.

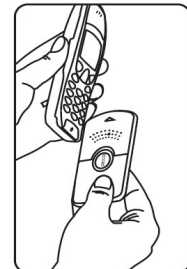


3.b. POŠILJANJE PREK STACIONARNEGA aparata:

Zvočnik naprave Vitaphone 100 IR nemoteno zadržite **ob mikrofону stacionarnega telefona** na razdalji **2 cm** (kot je narisano na sliki) in nato pritisnite gumb SEND



OPOZORILO!!!

Uporaba stacionarnega telefona zahteva za pošiljanje le kratek pritisk na gumb "SEND" na napravi Vitaphone 100 IR. Med prenosom se sliši zvočno šumenje. Kratak pisk nas obvesti o zaključku prenosa

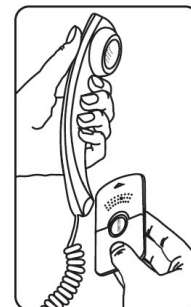

4. PO KONČANEM PRENOSU :


Postavite slušalko stacionarnega telefona oziroma mobilni telefon k ušesu.

V primeru pravilnega prenosa vam bo posredovana številka naprave Vitaphone 100 IR (*napisana na zadnji strani naprave*) in prenos podatkov bo s tem zaključen.

V nekaterih primerih imate po prenosu podatkov možnost posneti še **10 sekund trajajoče sporočilo**, v katerem navedete simptome o vašem počutju v času pred snemanjem EKG. V primeru, da prenos ni bil uspešen, sledite navodilom avtomatskega odzivnika.

5. POŠILJANJE PREK INFRARDEČE POVEZAVE

V primeru, da opravljate **prenos preko infrardeče povezave na GSM aparatu**, najprej **poskrbite, da bo IR funkcija aktivirana na vašem mobilnem telefonu** (pomagajte si z navodili mobilnega telefona). Ravno tako izključite možnost uporabe UMTS omrežja, saj v tem primeru podatki ne bodo poslani.

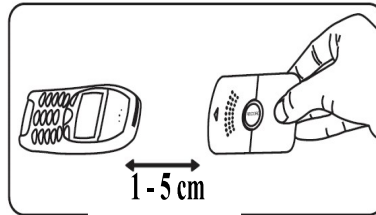

Za prenos podatkov postavite infrardečo vmesno ploskev vašega mobilnega telefona nasproti infrardeči ploskvi tele-EKG naprave v **razdalji 1-5 cm**. Pazite, da bosta vmesni ploskvi naprav v pravilni legi in pritisnite gumb **"SEND"**. Prenos je avtomatsko nadzorovan. Med avtomatskim prenosom ni potrebno vnašati ali klicati nobene številke. Klic se sproži avtomatsko.

OPOZORILA:

Naprava se ne sme uporabljati v sledečih primerih:

- v bližini elektronskih naprav
- pri napravah za defibrilacijo
- kjer je premočno območje elektromagnetnega sevanja (antene, transformatorji pod visoko napetostjo, generatorji, NMR tomografije (z magnetno resonanco), GSM signal),
- v primeru, da pacient uporablja zunanji srčni vzpodbujevalnik.

Naprava Vitaphone 100 IR nikakor ne ovira delovanja kakršnih koli kirurško vsajenih srčnih vzpodbujevalnikov.

POZOR!

Uporaba naprave ni namenjena za nujne primere. V primeru akutnih stanj uporabnika oz. pacienta, takoj pokličite zdravnika!